

みずみずしい健康
みずみずしい生活





もうひとつの水「酸性水」の
アストリンゼント効果。

電解酸性水は電解槽の陽極側で生成できる酸性の水です。
弱酸性水のアストリンゼント液として美容にお使いください。

TI-8000のダブル・オートチェンジ・クロスライン方式

電解還元水は電気分解の反応を利用して生成しています。電気分解はメッキの原理であるために必ず電極にスケールが付着します。電気分解の能力が高いほど電極にスケールが付着し、電解能力を低下させてしまいます。
このような現象を防ぐために一定の水量を生成した後、電極の極性を反転させて酸化反応を起こす槽と還元反応を起こす槽を入れ替えます。次にバルブの動作によって還元水の水路と酸性水の水路を変換させ、電解槽の内部のスケールを除去し、還元性に富んだ電解還元水を恒久的に生成します。
この方式をオートチェンジクロスラインと呼び2カ所採用していますので不均一な水圧を防ぎ更に安定した電解還元水を生成します。

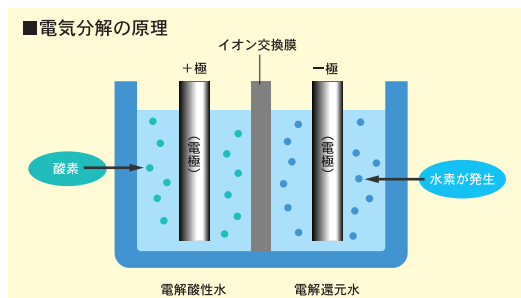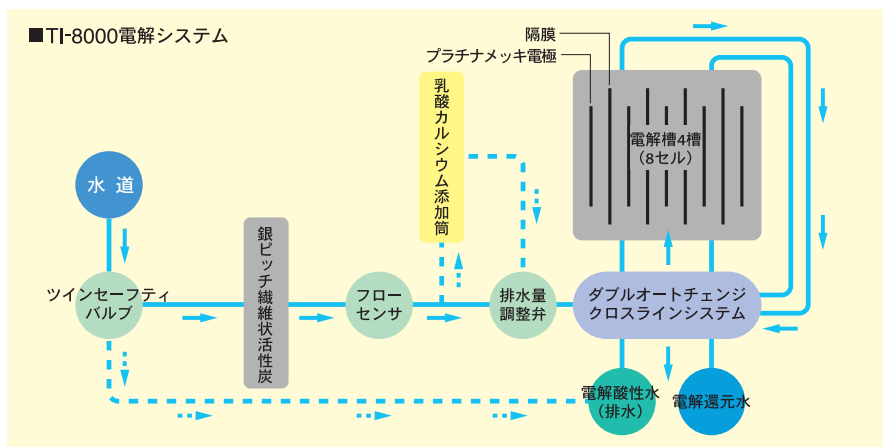

電気分解とは、電解質（ミネラルイオン等）を含む水に電流を流すと自発的には起こらない酸化・還元反応が電気エネルギーによって起こり、陽極側では酸化された水が、陰極側では還元された水がそれぞれ生成されます。



水道直結連続生成型電解還元水整水器
TRIM ION TI-8000
標準本体価格 **¥249,900** (税抜¥238,000)
<消費税込> (取付工事費別)

●お求め・お問い合わせは

●お肌を引き締め、健康な肌



■付属品
●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付●給・取水チューブ（ツインタイプ）1.5m●排水用チューブ（シングルタイプ）1.5m●乳酸カルシウム（30g）●吸盤●壁掛用ビス●pH指示薬フェノールフタレイン溶液（10cc）●ホース固定用バンド

■主な仕様
●医療用具製造承認番号:21000BZZ00545000
●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格電流:3A (5Amax.)
●電解生成電圧:55V (max.)●電解槽:4槽 (8セル)●電極:チタニウム・プラチナメッキ●生成水取水方式:2ウェイ方式
●定格生成量:還元水5.5ℓ/分 (max.) 酸性水5.5ℓ/分 (max.) 浄水7.0ℓ/分 (max.)
●入水圧力:0.5~7.0kg/cm²●本体重量:5kg●電源コード長:2m●本体寸法:273 (W)×336 (H)×137 (D) mm
●乳酸カルシウム添加装置:ケース挿入添加方式 (付属の乳酸カルシウムは、電気分解を促進させるための触媒です。)
●浄水カートリッジ寿命:残留塩素処理能力24トン (水質及び使用量によって多少の差異が生じますが、1日65リットル使用した場合で約1年間使用できます。)
●電解槽洗浄:ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式●電源回路:スイッチングレギュレーター制御方式
●本体保護回路:ヒューズ8A/定電流制御回路/過熱防止装置
※本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。



浄水カートリッジ **¥12,600** (税抜¥12,000)
標準価格<消費税込>

社団法人 日本病院会会員
財団法人 機能水研究振興財団
社団法人 日本ホームヘルス機器工業会正会員

株式会社日本トリム (証券コード:6788)

本社/大阪市北区大淀中1-8-34 PHONE.06-6456-4600 (代)
支社/東京・名古屋・広島・福岡 開発部・工場・高知
営業所/札幌・仙台・大宮・千葉・横浜・新潟・静岡・金沢・京都・岡山・山陰
高知・熊本・鹿児島

<http://www.nihon-trim.co.jp/>



水道直結連続生成型電解還元水整水器
TRIM ION TI-8000

●効果・効能
電解還元水:胃腸内異常発酵・胃酸過多・消化不良・慢性下痢・制酸
電解酸性水:弱酸性のアストリンゼント液として美容にお使いください。



身体にやさしい
身体にやさしい

水は私たちの身体の
約70%を占めています。
だからこそ
良い水が大切です。




生命の起源は水からと言われています。
水がなければ生命の生存・進化はもちろ
ろん35億年前に地球上に生命は誕生
しなかったでしょう。
水は生物にとって最も大切なものです。
しかし、生命を誕生又は育み進化させ
てきた太古の「水」には現代のような人
工的に合成された化学物質等は含まれ
ていなかったはずです。「電解還元水整
水器トリムイオンTI-8000」は水道水を
大型浄水器で塩素等を取り除ききれい
にした後、更に電気分解して抗酸化性
を持った水を生成します。
トリムの電解還元水でみずみずしい生
活をお過ごしください。

飲み方、使い方、いろいろ。
電解還元水は生活の水。

●水出し茶

電解還元水は沸かさなくてもそのまま
お茶が良く出ます。

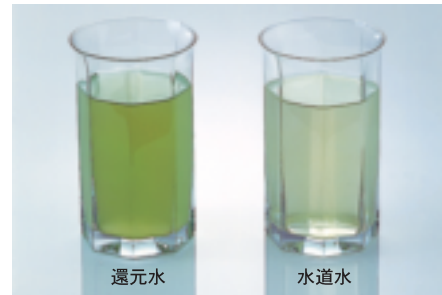

●毎日の飲み水として

塩素の入っていない還元性を持つトリ
ムの水は身体にやさしい飲料水です。

●胃腸に負担をかけない水として

胃腸内異常発酵・胃酸過多・慢性下痢・消
化不良・制酸に有効な電解還元水は胃腸
に負担をかけません。

●緑茶・紅茶・コーヒーに

おいしい水は緑茶・紅茶・コーヒーの味
を引き立てます。



●調理用の水に

調理用の水だけでなく、調理素材のアク
抜きなどにもお使いください。



●煮物に

昆布や鰹節などのダシを取るときにお
使いになると良くダシが取れます。



電解還元水
トリムイオンの
おいしい生活。



●果物の酸化防止に

トリムの電解還元水は抗酸化性をもっ
ていますので、果物の褐変反応を防ぎ自
然の色を保ちます。



●ご飯の炊き水に

還元性を持った水は、ご飯の酸化を防ぎ
ますので変色させません。



●アルコール類の水割りに

不純物の少ない水はお酒の味を変えま
せん。水にしてもお使いになれます。



■酸化と還元

●酸化とは

酸素と化合すること。水素を失うこと。電子
を失うこと。

例:鉄などを錆びさせる。リンゴなどを変色さ
せる。このような作用が酸化の代表的な反
応です。

●還元とは

水素と化合すること。酸素を失うこと。電子
を得ること。

例:鉄などを錆びさせない。リンゴなどを変
色させない。このような作用が還元の代表
的な反応です。

新機能で更にパワーアップ。
トリムイオン15の特長。

1 ダブル・オートチェンジ クロスライン方式

電解槽内の電極は電気分解によるメッ
キの作用で、使用しているうちに水中の
ミネラルが結晶化し、スケールとして電
極に付着し、電解能力を低下させます。
トリムイオンTI-8000は独自の自動極性・
水路反転洗浄装置を採用し、電極にスケ
ールが付着する事を防いでいます。

2 ツイン・セーフティーバルブ機能

本器内への温水の流入を防止するため
に形状記憶合金により、温水をバイパス
に流し込むバルブと機器内の水道水压
が過剰に高くなったときのセーフティ
ーバルブを採用しています。

3 スイッチング・レギュレーター 制御方式

水道水は季節、温度、地域等によって、そ
の水質が異なります。安定した電解還元
水を生成するためには電気分解する水
に対して一定の電流を流さなければ同
じ水質の電解還元水が生成できません。
トリムイオンTI-8000は電流を優先的に
設定し、電圧を自動的に選択するスイ
ッチングレギュレーター制御方式を採用し、
水質の変化に対応して安定した還元水
を生成します。

4 防水エンボス仕様タッチスイッチ

水道の側で使用する場合が多いため防水加工
のエンボス仕様タッチスイッチを採用して
います。



5 浄水カートリッジ交換お知らせ ブザー&ランプ (バックアップ機能付)

トリムイオンの浄水カートリッジは24トン
の水を浄水する能力を持っています。浄水カ
ートリッジの交換の時期は流量積算計によ
って使用水量を積算し、ブザー音と点滅のラ
ンプによってお知らせします。



6 24トン処理の 大容量浄水カートリッジ採用

250×95mmの大型浄水カートリッジにより
一般のご家庭では1日に65リットルご使用で1
年間ご使用になれます。
(原水の残留塩素濃度を2ppmとして浄水後の塩素濃
度が0.4ppmに達した時点寿命とする。)



7 8セルの多槽型電解槽採用

効率の良い電気分解をするためには水の単位
体積当たりの電気量を多くすることが必要で
す。トリムイオンTI-8000は8セルの多槽型電
解槽を採用し、電解効率を高めています。

8 メロディー音量調整スイッチ

電解還元水の生成中のお知らせはメロディー
が鳴ります。メロディー音が気になる方は音
量の調整ができます。

9 排水量調整バルブ機能

電解還元水と排水の取水バランスの調整がで
きます。排水量調整によって電解還元水の濃
度調整もできます。



10 場所をとらない2ウェイ方式

蛇口から電解還元水を取水する2ウェイ方式
ですので設置場所の制約がありません。

11 総生成量・最大1分間に8リットル

トリムイオンTI-8000は、定格電流を5A(max.)
と容量を大きくしていますので1分間に最大
8リットルの電解ができます。

12 分岐水栓取り付けアダプター フル装備

7種類のアダプターをセットしていますので、
どのような蛇口でも簡単に取り付けことが
できます。



13 過電流防止装置

電解質の多い水道水を電気分解すると電気が
異常に多く流れる時があります。トリムイ
オンTI-8000は電気量を安定させます。

14 過熱防止装置

電解質の多い水道水の地域では機器が過熱す
る場合がありますが、トリムイオンTI-8000は
過熱防止装置がセットされていますので安心
です。

15 誘導雷安全対策用サージアブソーバ

誘導性の雷が発生しても本体の保護回路が作
動する安全装置付です。